


Advincula
DELINEATOR™
Con Tecnología Koh-Efficient®


Manipulador Uterino Avanzado
Fuerza y desarrollo excepcional
Fácil de utilizar y desechable

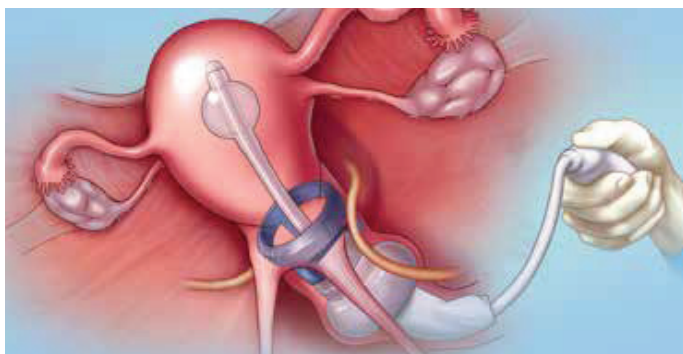

CooperSurgical

Facilidad de uso sin precedentes, seguridad
y Fuerza para TLH, LSH Y LAVH –
En un diseño desechable eficiente




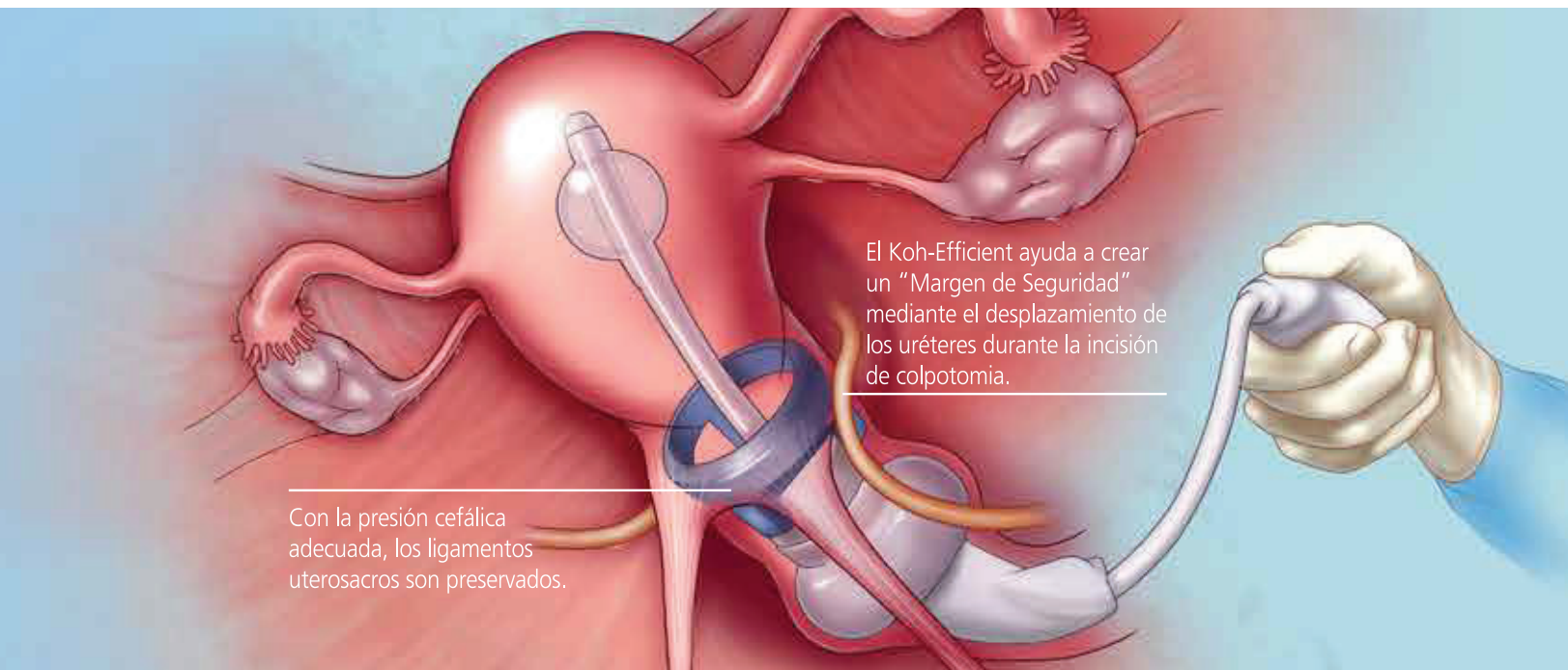

El diseño superior simplifica la preparación y velocidad de la inserción


El Advíncula Deliniator™ está diseñado para su fácil utilización, seguridad y máxima eficiencia.

- Sondee el útero y utilice el medidor cervical para determinar el tamaño apropiado de la copa Koh.
- Remueva el dispositivo completamente armado del empaque estéril.
- Coloque el manipulador dentro del cérvix e infle el balón uterino.
- Deslice el Koh-Efficiente® al número sondeado marcado en el mango.
- Presione el seguro de posición para asegurar la copa, e inicie el procedimiento.

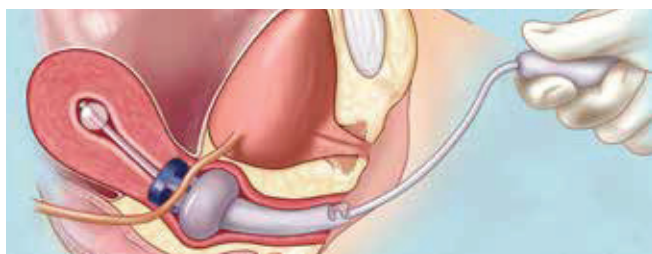

El Koh-Efficient ayuda a crear un “Margen de Seguridad” en la anatomía distal crítica.

Con la aplicación de la presión cefálica correcta, el Koh-Efficient ayuda a crear un “Margen de Seguridad” mediante la preservación de los ligamentos úterosacros y desplazamiento de los uréteres durante la incisión de colpotomía.

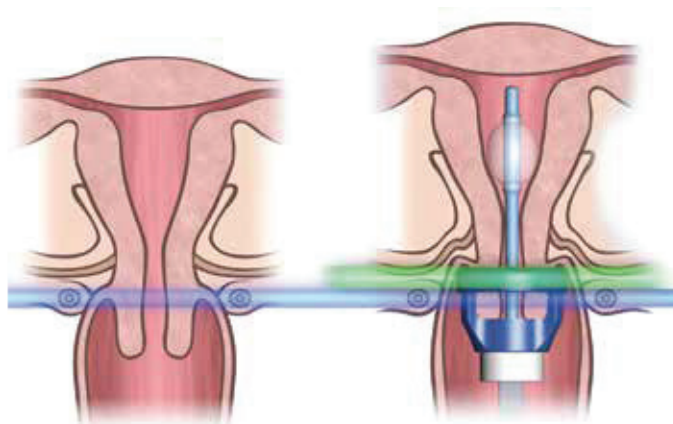

Integrado, diseño unificado, simplifica la preparación e inserción.

Disponible en tres
Tamaño de Copas
adaptables a la
preferencia del cirujano
y a las fuentes de
energía.



Ultem™ Caso de plástico para usar
con dispositivos electroquirúrgicos.



Copa de acero inoxidable para usar con
bisturí armónico y dispositivos láser.



Copa flexible y suave diseñada para
una fácil inserción y para usar con
dispositivos electroquirúrgicos.

Advincula **DELINEATOR™** Con Tecnología Koh-Efficient®

Información para pedidos

Advincula Delineator™ con Ultem Koh Efficiente®

AD750 - KE25	Advincula Delineator 2.5 CM Ultem copa plástica de (3 por caja)
AD750 - KE30	Advincula Delineator 3.0 CM Ultem copa plástica de (3 por caja)
AD750 - KE35	Advincula Delineator 3.5 CM Ultem copa plástica de (3 por caja)
AD750 - KE40	Advincula Delineator 4.0 CM Ultem copa plástica de (3 por caja)

Advincula Delineator™ con Koh Efficiente® de acero inoxidable

AD750 - KES25	Advincula Delineator 2.5 CM copa de acero inoxidable (3 por caja)
AD750 - KES30	Advincula Delineator 3.0 CM copa de acero inoxidable (3 por caja)
AD750 - KES35	Advincula Delineator 3.5 CM copa de acero inoxidable (3 por caja)
AD750 - KES40	Advincula Delineator 4.0 CM copa de acero inoxidable (3 por caja)

Advincula Delineator™ con Copa Flexible y suave Koh Efficiente®

AD750SC - KE25	Advincula Delineator 2.5 CM copa suave y flexible (3 por caja)
AD750SC - KE30	Advincula Delineator 3.0 CM copa suave y flexible (3 por caja)
AD750SC - KE35	Advincula Delineator 3.5 CM copa suave y flexible (3 por caja)
AD750SC - KE40	Advincula Delineator 4.0 CM copa suave y flexible (3 por caja)

CooperSurgical

For more information, call 800.243.2974 or 203.601.5200 or visit www.coopersurgical.com.
800.243.2974 | 203.601.5200 | www.coopersurgical.com | 95 Corporate Drive, Trumbull, CT 06611